

APTOS



APTOS

FADENLIFTING

Patientenaufklärung

 www.aptos.global

WITH
MORE THAN
10000
APTOS
CERTIFIED
DOCTORS
IN MORE
THAN 50
COUNTRIES
RENOVATING
BEAUTY
SINCE
1996
INSPIRED BY
300
TUTORIALS
& LIVE
DEMONSTRATIONS
AT APTOSVIDEO.COM



Was müssen Sie über

APTOS-FADENLIFTING

wissen?

Mit zunehmendem Alter wird der Einfluss der Schwerkraft auf unser Gesicht spürbarer. Das Stützgewebe der Wangen wird schwächer und fängt an durchzuhängen und die Fettschicht des Gesichts wird dünner. In der Kieferpartie, die früher ausgeprägt und fest war, bilden sich Hängebacken an den Rändern des Mundes. Zudem sinkt der untere Teil des Gesichts und der Hals ab. Die Ärzte bezeichnen diesen Prozess als Ptose.

Bisher hätte dies die meisten Menschen dazu veranlasst, sich einem Facelift bei einem plastischen Chirurgen zu unterziehen. Heute steht jedoch

eine weniger invasive Methode zur Verfügung, die das hängende Gewebe von Gesicht, Hals und Körper anheben, formen und festigen kann und damit Menschen helfen kann, die nur geringe bis moderate Veränderungen benötigen, um wieder jünger auszusehen.

Fadenlifting ist ein Verfahren, bei dem verschiedene Bereiche vom Gesicht und am Körper mit speziell entwickelten Fäden angehoben werden, ohne dass Hautschnitte vorgenommen werden, wie dies bei einem herkömmlichen Facelift erforderlich ist. Dabei wird auch der Hauttonus, die Textur, Farbe und Feuchtigkeit der Haut verbessert.



Der georgische plastische Chirurg Marlen Sulamanidse hatte die Idee, Spezialfäden entlang der gesamten Länge mit Widerhaken zu versehen, die ähnlich wie ein Seil dazu dienen, die Hautsenkung an den Augenbrauen, Wangen und der Stirn aufzuhalten. Aus dieser Idee entwickelte er in den späten 1990er Jahren die APTOS-Fäden. Diese Fäden mit Widerhaken wurden patentiert und weiterentwickelt. Inzwischen wurden auch weitere Arten von Fäden, sowohl mit Widerhaken als auch glatt, für den Einsatz in Fadenliftverfahren konzipiert.

Wenn Sie sich für das Aptos-Fadenlifting entscheiden, werden Ihnen die folgenden Informationen eine grundlegende Vorstellung des Eingriffs vermitteln. Diese Aufklärung kann Ihnen nicht alle Ihre Fragen beantworten. Alle weiteren Fragen sollten zwischen dem Patienten und dem Arzt geklärt werden.



Bitte fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie etwas nicht verstehen.



Für wen eignet sich

DAS LIFTING MIT APTOS-FÄDEN?

Das Fadenlifting eignet sich in erster Linie für Menschen mit geringen bis mittleren Anzeichen von Hautabsenkung. In der Regel sind das Frauen und Männer zwischen 35 - 55.

Das beste Ergebnis haben Patienten mit folgenden Beschwerden zu erwarten:


- Leichte bis mittlere Anzeichen von Hautabsenkung.
- Verlust von Gewebevolumens.
- Entwicklung von feinen Linien und Falten.
- Schlanke Augenbrauen.
- Hängende/abgesunkene mittlere Gesichtspartien.
- Verminderung des Lippenvolumens.
- Hervorstehender Kiefer.
- Leichte Hautabsenkung am Hals, leichte Tränensäcke.
- Patienten mit Rezidiven nach früheren Eingriffen, z. B. einem Gesichts- oder Halslifting.
- Gesichtsasymmetrie.
- Dehydrierte Haut.

Schlecht geeignet sind Patienten:

- Im fortgeschrittenen Alter mit stark faltiger/hängender Haut.
- Mit Übergewicht und schwerem, unebenem Gewebe.

Welche Areale können behandelt werden:

- Wangen und mittlerer Gesichtsbereich
- Gesichtskonturen
- Bereich unterhalb des Kinns
- Kieferpartie
- Augenbrauen
- Nase
- Ohren
- Lippen

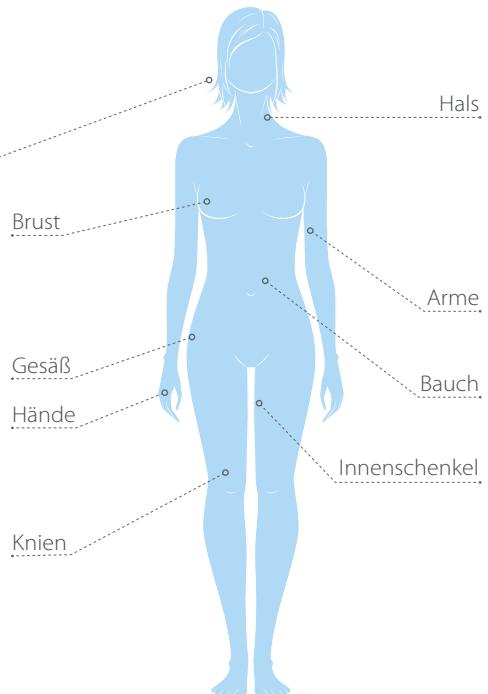

Ausschlussgründe des Liftings mit Fäden von Aptos:

- Allergien gegen Kunststoff, Biomaterial, Permanent-Filler
 - entzündliche Hautkrankheiten (z. B. Akne)
 - Eine Veranlagung zu Keloidbildungen
 - Autoimmunerkrankungen: Sklerodermie, Sarkoidosis, Amyloidose und weitere
 - Einnahme von Gerinnungshemmern wie Cumarin, Heparin, Aspirin
 - Hämophilie
 - Bluthochdruck Grad 2 und 3
 - Schwere Erkrankungen
 - Kollagenosen
 - Neurologische und geistige Störungen
 - Schwangerschaft und Stillzeit
 - Maligne Tumorerkrankung und Chemotherapie
 - Hepatitis B und C, HIV-Infektion
 - Porphyrrie
 - Zuvor implantierte Permanent-Filler
-

Was Sie wissen sollten:

Vor der Behandlung:

- Vor der Behandlung ist keine besondere Vorbereitung erforderlich.
- Wir empfehlen jedoch, dass Sie Ihre Erwartungen und alle Fragen mit dem behandelnden Arzt besprechen, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- Informieren Sie den Arzt über alle bisherigen Eingriffe/Behandlungen und über alle Medikamente, die Sie aktuell einnehmen.
- Vermeiden Sie die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten und Vitamin E eine Woche vor und nach der Behandlung.
- Die Implantation der Aptos-Fäden muss von einem speziell geschulten Arzt durchgeführt werden.
- Das Verfahren ist nicht schmerzhaft. Die Behandlung wird unter örtlicher Betäubung durchgeführt und hinterlässt keine Narben.

Die Behandlung:

- Die Behandlung dauert etwa 20 Minuten und wird in einem Behandlungsraum durchgeführt.
- Die meisten Patienten können noch am gleichen Tag wieder ihrer Arbeit/ihren Beschäftigungen nachgehen. Werden mehrere Fäden in einer Behandlung implantiert, sind stärkere Beschwerden möglich.
- Die Behandlung wird an Ihre Wünschen angepasst und kann mit anderen ästhetischen Verfahren kombiniert werden.

DIE VORTEILE DES FADENLIFTINGS:

- ✓ Doppelwirkung: Lifting und Hautverjüngung
- ✓ Minimalinvasiver Eingriff, lokale Betäubung im Behandlungsbereich
- ✓ Behandlungsdauer etwa 20 Minuten
- ✓ Sofort sichtbares Ergebnis
- ✓ Minimale Ausfallzeit
- ✓ Stimulierung der Kollagenneubildung, Förderung der Mikrozirkulation
- ✓ Langanhaltendes Ergebnis

Was passiert direkt nach der Behandlung?

Wie bei allen Verfahren dieser Art besteht die Möglichkeit von Nebenwirkungen.

Die Nebenwirkungen sind vorübergehend und können folgendes beinhalten:

- Schmerzen
- vorübergehende Asymmetrie
- vorübergehende Wellen- oder Grübchenbildung
- vorübergehende Blutergüsse oder Kontusionen
- Leichte Dellenbildung oder Hautunregelmäßigkeiten

Was sollte nach dem Fadenlifting beachtet werden:

- Legen Sie unmittelbar nach der Behandlung Kühlpacks auf die behandelten Stellen auf
 - Bei Schmerzen nehmen Sie bitte für 3-4 Tage lang Analgetika
 - Bitte verzichten Sie mindestens 24 Stunden auf Make-up
 - Schlafen Sie für 3-5 Nächte auf dem Rücken, mit erhöhtem Kopf
 - Waschen Sie Ihr Gesicht an den 5-7 folgenden Tagen vorsichtig und ohne jeglichen direkten Druck
 - Vermeiden Sie übermäßige Bewegungen von Gesicht und Hals für 2 Wochen
 - Vermeiden Sie Gesichts- und Nackenmassagen für 1 Monat
 - Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung für 2 Wochen
 - Treiben Sie 2 Wochen keinen Sport
 - Gehen Sie ca. 3 Wochen nicht in die Sauna
 - Vermeiden ca. 3 Wochen zahnmedizinische Eingriffe
-

Empfohlene Medikamente:

- Bei Schwellungen tragen Sie bitte für 1-2 Wochen mehrmals täglich Traumeel Gel, Troxevasin Gel oder andere Salben auf.
- Benutzen Sie im Eingriffsbereich antiseptische Lösungen (Chlorhexidin, Miramistin, usw).
- Bei Schmerzen nehmen Sie schmerzstillende Medikamente (Kethonal, Diclofenac, Ibuprofen usw).
- Nehmen Sie Antihistamine (Tavegil, Claritin usw.) ein.
- Zur Vermeidung von Infektionen empfiehlt Ihnen Ihr Arzt eventuell die Einnahme eines Breitbandantibiotikums über 5 Tage.
- Gegebenenfalls (je nach Indikation) wird Ihnen empfohlen, etwa 2 Wochen lang einen elastischen Verband zu tragen.
- Um den Rehabilitationsprozess zu beschleunigen, wird eine Mikrostromstimulation empfohlen. Dank dieses Verfahrens können Sie die Hautstruktur schnell verbessern und sie elastischer machen. Es wird empfohlen, die Mikrostromstimulation am zweiten Tag nach dem Fadenlifting zu beginnen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die oben nicht aufgeführt sind, einschließlich hohen Fiebers, zunehmender Schmerzen, Rötungen und Schwellungen im Eingriffsbereich oder anderen unangenehmen und unüblichen Empfindungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Wie werde ich nach dem Eingriff aussehen?

Verglichen mit dem traditionellen Facelift, das sichtbare Veränderungen und gut verborgene, aber deutliche Narben hinterlässt, entstehen beim Aptos-Fadenlifting keine Narben und Ihre Gesichtszüge bleiben unverändert. Sie werden aussehen wie auf Ihren Fotos einige Jahre zuvor.

VORHER



NACHHER

